

Sådan skifter du elektrode

ZOLL AED Plus hjertestarter




1 Placér hjertestarteren på et plant underlag foran dig.



2 Løft låget af hjertestarteren.



3 Tag fat i det hvide stik og træk det ud.

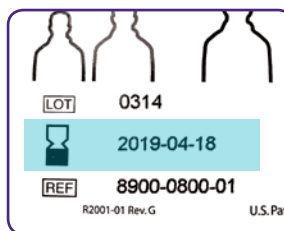

4 Tag den nye elektrode ud af papkassen og kontrollér elektrodens udløbsdato ved det lille timeglas.



5 Tilslut den nye elektrode i stikket. Tryk hårdt.



6 Fold eventuelt hjørnerne på elektrodepakningen ind, så den kan være i låget.



7 Skub den gule snip ud gennem slidsen i låget.



8 Sæt låget på hjertestarteren.

Elektroden er nu skiftet og hjertestarteren er klar til at få skiftet batterier.

Vend for vejledning.

Sådan skifter du batterier

ZOLL AED Plus hjertestarter



- 1 Vend hjertestarteren, så bagsiden vender opad.



- 2 Brug en mønt eller nøgle til at trykke de to riller ind på batteridækslet.
Brug samtidig den anden hånd til at klikke låget af.




- 3 Tag dækslet af og fjern de gamle batterier.

Isæt nye batterier. Sørg for at de sidder korrekt, og polerne vender rigtigt.




Alle 10 batterier SKAL udskiftes samtidig. Brug kun Duracell eller Power One batterier. Brug **IKKE** Panasonic, Varta eller Rayovac batterier.

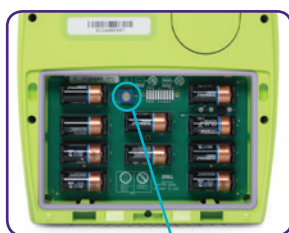

- 4 Når de nye batterier er isat, vil hjertestarteren efter kort tid bede dig om at trykke på batteri-nulstillings-knappen.


Tryk på nul-stillings-knappen, inden for 15 sekunder, når du hører beskeden: **"Hvis batterier er nye, tryk på knappen"**.

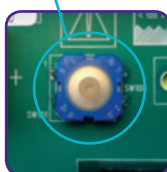

Hvis elektroden ikke er isat, vil hjertestarteren minde dig om det med beskeden: **"Isæt ledning"**.



- 5 Batteridækslet klikkes/sættes på plads.

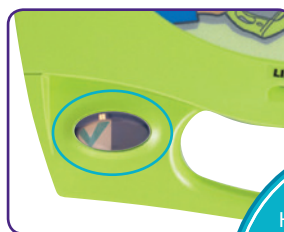

- 6 Kontrollér, at der vises et grønt flueben ✓ i indikatorvinduet.

Hjertestarteren er nu klar til brug. Batterier og elektrode har 5 års holdbarhed i standbytid.

www.hjertevagt.dk